

Snabbmanual Variana

Funktioner i boendeläge

Beskrivning av LED-indikator

Grön: Ingen åtgärdsknapp är intryckt; systemet är driftklart

Obelyst: Sängen är inte ansluten till elnätet

Gult i 2 sekunder: Vid byte av låst eller inte låst läge.

Gult kontinuerligt: Sängen förflyttas eller felindikation.
(även om ingen knapp tryckts in).



Ryggdel

Sittläge

Höjdjustering

Upp

Pilknapparna blinkar när man väljer en funktionsknapp

Ner

Lårstöd

Vadstöd

Aktiveringstider

- Vid beröring av handkontroll aktiveras samtliga funktioner i 20 sekunder.
- Vid val av en funktion är valet aktivt i 16 sekunder.
- Vid val av komfortläge eller vid val av vadstödet är funktionen aktiv i 16 sekunder. Därefter är samtliga funktioner aktiva under 2 minuter. Detta kallas för vårdläge.

Grundfunktioner



Tryck först på aktiveringsknappen och sedan på upp- eller nerknappen

Aktivering av vårdläge



Håll in knappen för komfortläge eller för Trendelenburg läge i 3 sekunder

Låsning av handkontroll



Håll knapparna för ryggdel och höjdjustering intryckta i minst 5 sekunder, tills LED-lampan lyser röd.

Demontering



Bromsa sängen och sänk/höj sängen till monteringsläge (Metallpilen på underredet skall vara fyllt, vänligen se bild). För ändamålet måste tvärstaget på saxlyften vara i nivå med markeringen på underredet. Koppla sedan bort strömkabeln från strömuttaget och häng strömkabeln på sänggaveln med hjälp av plastkroken.

Demontering delade sidogrindar (typ 10)



Lossa men ta inte bort låsskruvarna, på båda sidor av grindarna. Grindarna kan nu enkelt lyftas ur sina fästen.

Demontering hela grindar (typ 09)



Tryck på frisläppningsknappen på den övre grinden och låt alla delar fällas ihop. Använd en skruvmejsel eller dylikt och tryck ned stiftet i botten av metallramen på huvud- och fotgavel för att ta bort alla grindskenor i skenan.

Avmontering av huvud- och fotgavlar.




Öppna de röda fästena (genom att dra och vrid 90°) och ta sedan bort huvud- och fotgaveln genom att dra uppåt från hållarna.

Motorer och handkontroll



Lossa och fäll ner liggytans sittdel på ena sidan från fästet och fäll upp det. Ta bort handkontrollkabeln från kontakten.

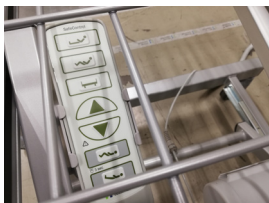

Sätt handkontrollen i avsedd hållare i ramen.




Lossa trådnätet från vadväddet på ena sidan och vik det över. Lossa motorkåpan, genom att vrida den gula plastknappen.



Ta bort locket på kontrollboxen och dra ut alla färgade kontakter och lossa dem från fästet.

Demontera liggytan

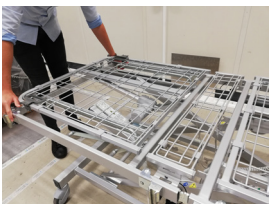

Lossa låsskurvarna på båda sidor av den övre ramen. Dra ut liggytan vid huvudändan.



Dra ut liggytan helt tills den lossnar från ramen. Sänk den sedan först till golvet och dra sedan upp den på ovansidan och ta bort den.



Öppna de två röda fästena på patientunderredet på fotsidan och dra ut. Sänk och ta bort det på samma sätt som huvudunderredet.



Sätt tillbaka locket på kontrollboxen och anslut sängen till el och flytta den till sitt lägsta läge.



Borttagning av saxlyften görs genom att öppna de 2 röda fästena vid underredet. Gör sängen klar för transport

Gör sängen klar för transport.




Transportfästen för patientunderredet är placerade på sidan av chassit. Dessa placeras först på mittskenan och skjuts sedan in den i huvud- eller fothållaren.

Montering




Bromsa sängen och sänk/höj sängen till monteringsläge (Metallpilen på underredet skall vara fyllt, vänligen se bild). För ändamålet måste tvärstaget på saxlyften vara i nivå med markeringen på underredet. Koppla sedan in strömkabeln till strömuttaget. Ta bort locket från kontrollboxen.

Montering av liggytan

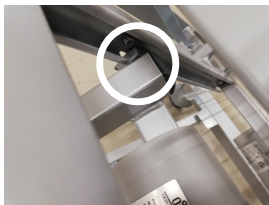

Skjut in fästena på ramen i monteringsskenorna på liggytan. Ramen låses när den kommit på plats, ett klickljud hörs.

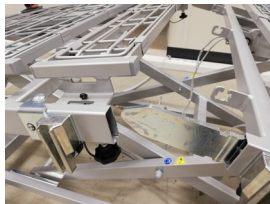

Sätt in liggytan vid huvudändan och sätt det samman med fotändan. Skruva sedan på låsskruven.

Motorer och handkontroll



Lossa liggytan vid lårstöd och sittdelen, på ena sidan från fästet och fäll ner det. Sätt i kontakterna från liggmotorerna i kontrollboxen. Sätt i kontakten för handkontrollen och fäst kabeln i fästet (se bild). Sätt tillbaka kontrollboxens lock och sätt tillbaka trådnäten.

Montering av huvud- och fotgavel



Häng på huvud- och fotgavlarna i fästena för detta och lås fästet.

Montering av delade sidogrindar (typ 10)



Sätt i sidogrindarna på den övre ramen på respektive sida, lås dem med avsedda vingskruvar.

Montering hela grindar (typ 09)



Tryck ned stiftet i botten av metallstyrningen på huvud- och fotgaveln för att sätta in alla grindskenor i skenan.